



**Alkol bazlı hızlı dezenfektan
aldehit içermez**

mikroqid® AF liquid

Artılarımız:

- ✓ Kullanıma hazır
- ✓ Aldehid içermez
- ✓ Kısa temas süresinde geniş etkinlik gösterir
- ✓ Hızlı ve kalıntı bırakmadan kurur

Uygulama Alanı

Kısa temas süresi gerektiren ve enfeksiyon riskinin arttığı tıbbi cihaz ve alanlarının alkol bazlı hızlı dezenfeksiyonunda kullanılır.

- Hasta bakım üniteleri
- Muayene masası
- Operasyon masaları ve çalışma yüzeyleri
- Medikal cihaz yüzeyleri

Her çeşit yüzeyin hızlı dezenfeksiyonu için alkol bazlı preparat

Kullanım Talimatları

mikroqid® AF liquid kullanıma hazırdır. Seyreltilmeden dezenfeksiyon yapılacak cihazın üzerine direk olarak sıkılabileceği gibi, temiz bir bez üzerine sıkılarak da ilgili alana uygulanabilir. Dezenfekte edilecek cihazın tamamen ıslandığından emin olun. Durulama yapmayın.

Mikrobiyolojik Etkinlik

- Bakteriler
- Mantarlar
- Virüsler
 - Hepatitis B viruses
 - HIV
 - HCV
 - Adenoviruses
 - Rotaviruses
 - Papovaviruses
 - Polioviruses

Temas Süresi

Etki	Temas Süresi
Bakteriler, mantarlar (C. albicans)	1 dak
MRSA	1 dak
Tb	1 dak
Virucidal*	30 dak
Zarflı virüslere karşı etkilidir * (HIV, HBV, HCV)	30 saniye
Adenovirüsler (tip 2)	2 dak
BVDV	30 saniye
Norovirusler**	1 dak
Rotavirusler	30 saniye
Poliovirusler	30 dak
Papova SV 40	15 dak
Vacciniavirus	30 saniye
VAH / DGHM-List / Sertifika Hastanelerde yüzey dezenfeksiyonu ve tıbbi uygulamalar	5 dak
ÖGHMP Expertise No. 95/8	1 dk

* Robert Koch Enstitüsü kılavuzuna uygun olarak - Alman Federal Sağlık Gazetesi 01/2004

** Murin Noroviruses EN 14 476 uyarınca

mikrozid® AF liquid

Ürün Verisi

100 g çözelti: 25g etanol ve 35g 1-propanol içermektedir.

Kimyasal-fiziksel Veri

Görünüş:	Berrak, renksiz sıvı
20 °C sıcaklıktaki yoğunluk:	0,90 g/ml
Parlama Noktası	27 °C (DIN 51 755)

Tedarik Formları/Ambalaj birimleri

Konteyner büyüklüğü	Ambalaj birimleri
1 L şişe	10 x 1 L

Çevreyle ilgili bilgiler

Schülke ürünlerini yüksek standartlarda, gelişmiş, güvenli ve çevre dostu üretim prosesleri ile ekonomik olarak üretmektedir.

EC Direktiflerine etiketleme

Xi	Tahriş edici
R10:	Alevlenir
R41:	Gözde ciddi hasar riski
R67:	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir
S2:	Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun
S26:	Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S35:	Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir
S39:	Koruyucu gözlük/maske kullanın
S51:	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Uzman görüşü ve bilgi

Daha fazla bilgi için;

Tel; 216 561 30 64

Email: info@ilsanilac.com.tr

Özel Tavsiye

Dezenfektanları güvenli kullanın. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgisini okuyun.

Eldiven giyilmesi önerilmektedir.

Tutuşturucu cisimlerden uzak tutun.

mikrozid® AF liquid metal ve plastiklerle harika uyum gösterir

Ürün alkol ile geçimsiz olan akrilik cam vb malzemelerde kullanılmamalıdır.